



DE

Gebrauchsanweisung



REF 40030

REF 40020

MD 



-10°C
min.  30°C
max.

Was ist die RheoDol® Oral Hygiene

Die RheoDol® Oral Hygiene bietet Patientengruppen, insbesondere der Intensivpflege und Onkologie, das innovative Produktkomponenten-System auf biomolekular-wissenschaftlicher Basis zur oralen Reinigung^(A), Keimreduktion^(B) und Wundpflege^(C). Für diese Patientengruppen wie auch anderen bereits ab Kindesalter stellt die RheoDol® Oral Hygiene eine dauerhaft einsetzbare, kostengünstige und optimale Produktzusammenstellung dar.

Die Medizin- / Pflegeprodukte sind im Oral Hygiene ABC Orale Reinigung^(A), Keimreduktion^(B) und Wundpflege^(C) sowie in der Einzelanwendung nutzbar.

Oral Hygiene ABC Anwendung erfolgt gemäß 3-Schritt-System. Weitere Informationen auf folgenden Seiten.

Einzel-Patientenanwendung

3-Schritt-Anwendung der RheoDol® Oral Hygiene



1. Zähne
2. Zunge
3. Gaumen
4. Zahnfleisch
5. Mundschleimhaut
6. Lippen
7. Zahnimplantate
8. Zahnprothesen

A

RheoDol® Oral Hygiene Gel plus

Orale Reinigung

Erbsengroße Menge Gel morgens, abends sowie nach Mahlzeiten zum Zähneputzen und Reinigen der gesamten Mundhöhle und Zunge. Für Zungenreinigung und Entfernung von krankhaften Belägen einfach Watte- oder Mundpflegestäbchen benutzen. Möglichst nicht nachspülen, Reste des Gels in Mundhöhle und auf Zunge verteilen. Natürlicher Zahnbestand, Implantate und herausnehmbare Prothesen können ebenfalls mit Gel gereinigt werden.

Anwendung

- Deckel von der Flasche entnehmen
- Sicherungsnippel entfernen
- Durch Druck auf den Flaschenkopf erbsengroße Menge Gel applizieren
- Gel mit Tupfer in der Mundhöhle anwenden
- Flasche bei Anbruch mit Datum versehen
- Trocken, lichtgeschützt bei Zimmertemperatur aufbewahren (nach Anbruch bis zu 12 Monate haltbar)

DE
Gebrauchsanweisung

B

RheoDol® Oral Hygiene Liquid plus

Orale Keimreduktion

Spüllösung (Liquid) nach oraler Reinigung oder zusätzlich bei entzündlichen Prozessen öfter anwenden. Dosierung mittels Dosierbecher ca. 5-10 ml zum Spülen oder Tupfen (z.B. mit Watte- oder Mundpflegestäbchen) von Kauleiste, Wangentaschen und vorderen Bereich der Mundhöhle, etwa 1-2 Minuten. Bei Halsschmerzen wird Gurgeln empfohlen. Möglichst nicht mit Wasser nachspülen.

Anwendung

- Dosierbecher vom Flaschenkopf abziehen
- Flaschendeckel abschrauben
- Dosierung im Becher ca. 5-10 ml
- Lösung in der Mundhöhle anwenden
- Flasche nach Gebrauch verschließen
- Flasche bei Anbruch mit Datum versehen
- Trocken, lichtgeschützt bei Zimmertemperatur aufbewahren (nach Anbruch bis zu 12 Monate haltbar)

C

RheoDol® Oral Hygiene Gel plus

Orale Wundpflege

Nach Anwendung der Spülung (Liquid) erbsengroße Menge vom Gel in Mundhöhle, auf Zunge und Schleimhäute verteilen. Mehrfach täglich anwenden bei bestehender Mundtrockenheit und Entzündungen wie z.B. Aphthen, zur Befeuchtung und Entzündungshemmung sowie bei stark belegter Zunge zur Zungenreinigung, um Beläge mittels Watte- oder Mundpflegestäbchen vorsichtig abzulösen und zu entfernen.

Anwendung

- Deckel von der Flasche entnehmen
- Sicherungsnippel entfernen
- Durch Druck auf den Flaschenkopf erbsengroße Menge Gel applizieren
- Gel mit Tupfer in der Mundhöhle anwenden
- Flasche bei Anbruch mit Datum versehen
- Trocken, lichtgeschützt bei Zimmertemperatur aufbewahren (nach Anbruch bis zu 12 Monate haltbar)



ELISCHA Medical GmbH

Sonnenallee 17-21

DE 06766 Bitterfeld-Wolfen



ALPRO MEDICAL GmbH

DE 78112 St. Georgen



ACTO GmbH

DE 31613 Wietzen

RheoDol®.com
Medizinpflegeprodukte ELISCHA

